

Manuale di utilizzo Liberator - Powerdrive PSR



POWERDRIVE PSR LIMITED



Edizione 05

SI PRENDA DEL TEMPO PER LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI COMINCIARE AD UTILIZZARE IL MONTASCALE A POLTRONA LIBERATOR



©2007 Powerdrive PSR ltd
tutti i diritti riservati

Questo documento fa riferimento al modello standard del montascale a poltrona Liberator. Il fornitore quindi non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi forma di perdita o guasto che potrebbero risultare da specifiche che deviano dal modello standard del montascale a poltrona, come esso Le viene consegnato.

Tutta l'attenzione possibile è stata presa nella preparazione di questo documento, ma il fornitore non si assume alcuna responsabilità di eventuali errori o conseguenze di tale errore.

Informazioni di fabbricazione

Nome: Powerdrive PSR
Indirizzo: Ind Est, Stazione termale Di Leamington, CV31 1PZ
Di Sydenham
Telefono: 01926 425 747
Fax: 01926 315 400
Modello: Liberator
Anno di fabbricazione:

IN CASO DI GUASTO SI PREGA DI CONTATTARE IL NUMERO SOTTOSTANTE E CHIEDERE DEL SERVIZIO CLIENTI

AZIENDA _____

TELEFONO _____

Benvenuto nel Suo montascale a poltrona Liberator

Il Suo montascale è stato progettato ed installato per soddisfare le Sue diverse esigenze.

È davvero semplice da usare

Si prenda pochi minuti per leggere i contenuti di questa guida dell'utilizzatore, che include:

- 1/ Le caratteristiche principali
- 2/ Considerazioni sulla sicurezza
- 3/ Istruzioni di funzionamento passo per passo
- 4/ Manutenzione

Tenga questa guida a portata di mano per eventuali necessità future.


Può essere utile che anche altri familiarizzino con gli aspetti tecnici del montascale.



PROGETTATO CON VOI IN MENTE

Caratteristiche Di Qualità

Il Suo montascale a poltrona è stato progettato per ottenere il massimo della convenienza; permettendo il funzionamento non solo dalla sedia ma anche attraverso dei telecomandi a infrarossi posizionati alla partenza della scala ed all'arrivo in alto.

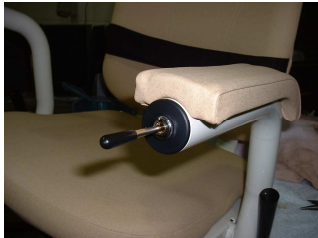

Funzionamento dei joystick



Comando a infrarossi

Ogni telecomando è alimentato da una batteria da 9 volt.

La direzione verso cui il montascale viaggia è controllato da una leggera pressione del dito sul joystick sul bracciolo o premendo i pulsanti “su” e “giù” (up e down) sui telecomandi a infrarossi. Questi devono essere premuti in continuazione affinché il montascale si muova.

Il montascale si arresterà se la pressione non viene effettuata.

Il sedile è dotato di un interruttore nero di accensione/spengimento (“on”/“off”), un importante elemento di sicurezza, specialmente in cima alla scala o nel caso in cui ci sia più di un utente.



Se necessario, gli **interruttori on/off con funzionamento tramite chiave** possono essere inseriti come optional extra. Questi impediscono l'uso non autorizzato del montascale se rimuoverà la chiave dopo aver ruotato l'interruttore su "off".

Il montascale si arresterà se i relativi bordi di sicurezza entrano in contatto con qualsiasi ostacolo. Dopo aver aspettato 3-4 secondi, potrà rimuovere l'oggetto prima di riprendere il Suo viaggio in piena sicurezza.



Argomenti inerenti la sicurezza

Il montascale a poltrona Liberator è molto facile da usare.

Per accertarsi di compiere operazioni sicure, segua le istruzioni di sicurezza qui sotto:

- 1/ Non usare il montascale quando persone o animali si trovano sulle scale
- 2/ Non permetta a nessuno di manomettere l'impianto
- 3/ Non permetta a nessuno di giocarvi
- 4/ Non lo utilizzi in caso di incendio
- 5/ Si assicuri che tutte le parti siano posizionate correttamente prima dell'uso
- 6/ Faccia sapere al fornitore le difficoltà che può incontrare nell'utilizzo dell'impianto
- 7/ Faccia assistere regolarmente l'impianto da un tecnico autorizzato.

Quando si siede sulla sedia:

- 1/ si assicuri che non ci sia niente lungo il percorso del montascale o sulle scale
- 2/ Si sieda bene indietro con la cintura di sicurezza allacciata
- 3/ Eviti di sporgersi dal sedile

Per concludere, lasci libere le scale alle altre persone: -

- 1/ Pieghi il poggiatesta e il sedile
- 2/ Si assicuri che la cintura di sicurezza non penda

Chiamare e rimandare il montascale

Preparare il montascale per l'uso:

- 1/ Rimuova ogni ostacolo dalle scale
- 2/ Posizioni correttamente la sedia

Per chiamare o rimandare il montascale non occupato:

- 1/ Prenda il telecomando dal supporto ed lo punti verso la sedia
- 2/ Tenga premuto il pulsante "su" o "giù" del telecomando
- 3/ La sedia suonerà e si posizionerà nella direzione desiderata dopo 3 secondi
- 4/ Controlli il movimento del montascale, finchè non si arresta all'arrivo
- 5/ Smetta di premere i comandi "up" o "down"
- 6/ Riposizioni il telecomando nel supporto

Preparare il montascale per il trasporto con persona a bordo

Semplicemente:

- 1/ Controlli che le scale siano completamente libere
- 2/ Faccia salire il passeggero ed agganci la cintura di sicurezza
- 3/ Prema e tenga premuto il pulsante "su" o "giù" del telecomando
- 4/ La sedia si muoverà in 3 secondi dopo un breve suono
- 5/ Mantenga premuto fino all'arrivo in alto
- 6/ Abbassi la leva sotto il sedile e si giri verso il pianerottolo
- 7/ Rilasci la leva e blocchi il sedile nella posizione di "girato"
- 8/ Faccia scendere il passeggero, rigiri la poltrona, e ripieghi il tutto.



Funzionamento della guida incernierata motorizzata

Se il Suo montascale è provvisto, alla partenza, di guida incernierata motorizzata, operi come segue:

- 1/ Per alzare la guida incernierata porti la poltrona fino all'arresto superiore, mantenga premuto il joystick verso l'alto, dopo circa 6 bip la cerniera si solleverà
- 2/ Per abbassare la guida incernierata dal parcheggio in alto prema il joystick verso il basso e attenda che la guida si abbassi e si blocchi
- 3/ Per parcheggiare il montascale sul punto di ricarica prema il tasto grigio sul bracciolo. Il montascale viaggerà fino alla metà del punto di ricarica e dopo approssimativamente 6 bip la cerniera si alzerà
- 4/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica in basso prema il tasto verde sul radiocomando. La cerniera si abbasserà ed il montascale scenderà fino a terra

Funzionamento della guida incernierata manuale

Se il Suo montascale è provvisto, alla partenza, di guida incernierata manuale, operi come segue:

- 1/ Per parcheggiare il montascale nel punto di ricarica prema il tasto grigio sul bracciolo. Il montascale raggiungerà il punto di ricarica e dopo che il montascale si sarà arrestato la guida incernierata potrà essere alzata manualmente.
- 2/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica in basso, abbassi manualmente la guida incernierata ed si assicuri che la cerniera sia bloccata nella posizione. Prema il tasto verde sul radiocomando ed il montascale scenderà.

Noti che il montascale non lascerà il punto di ricarica superiore se la cerniera è aperta.

Parcheggio intermedio

Se il Suo montascale è dotato di parcheggio intermedio, operi come segue:

- 1/ Per parcheggiare il montascale sul punto di ricarica prema il tasto grigio sul bracciolo. Il montascale si muoverà verso il punto di ricarica intermedio.
- 2/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica intermedio, prema il tasto verde del radiocomando.

Funzionamento del sedile girevole motorizzato

Se il Suo montascale è dotato di sedile girevole motorizzato, operi come segue:

- 1/ Per girare il sedile, sposti il montascale fino alla fermata in alto e tenga premuto il joystick verso l'alto, dopo circa 6 bip il sedile girerà.

Per far tornare il sedile alla posizione iniziale quando si trova alla fermata in alto, prema il joystick verso il basso, dopo 6 bip il sedile girerà automaticamente verso la posizione corretta ed il montascale scenderà verso il basso.

Guida incernierata motorizzata e giro sedile motorizzato

Se il Suo montascale è dotato di guida incernierata motorizzata ed un giro sedile motorizzato, operi come segue:

- 1/ Per alzare la cerniera, porti il montascale alla fermata in alto e tenga premuto il joystick verso l'alto, dopo circa 6 bip la cerniera si solleverà. Dopo altri 6 bip il sedile girerà per far sbarcare l'utente.
- 2/ Per girare il sedile, prema il joystick verso il basso. Il montascale farà 6 bip ed il sedile girerà nella posizione corretta per la corsa, quindi il montascale farà altri 6 bip e la cerniera si abbasserà. Una volta che la cerniera è stata bloccata il montascale lascerà la fermata in alto e scenderà.

Funzionamento del telecomando

- 1/ Per parcheggiare il montascale nel punto di ricarica prema il pulsante grigio del telecomando. Il montascale raggiungerà il punto di ricarica intermedio in basso e dopo circa 6 bip la cerniera si solleverà
- 2/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica intermedio prema il pulsante verde sul telecomando. Dopo circa 6 bip la cerniera si abbasserà e, una volta bloccata nella posizione corretta, il montascale scenderà.
- 3/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica in alto quando il sedile è girato: il sedile tornerà alla sua posizione corretta, la cerniera si abbasserà ed il montascale scenderà fino alla fermata in basso.

Nota

Il tasto rosso sul telecomando non farà girare il sedile, ma alzerà la cerniera.

Funzionamento del sedile girevole motorizzato e della guida incernierata manuale

Se il Suo montascale è dotato di sedile girevole motorizzato e di guida incernierata manuale, operi come segue:

- 1/ Per girare il sedile, porti il montascale fino al parcheggio in alto e muova il joystick verso l'alto, dopo circa 6 bip il sedile girerà.
- 2/ Per rigirare il sedile quando si trova al parcheggio in alto, prema il joystick verso il basso, dopo 6 bip il sedile girevole tornerà automaticamente alla posizione corretta ed il montascale tornerà al parcheggio in basso.

Nota: La guida incernierata manuale deve essere abbassata e bloccata nella sua posizione prima che il montascale lasci il parcheggio in alto.

Funzionamento del telecomando

- 1/ Se il sedile è stato girato nel parcheggio in alto e desidera chiamare il montascale giù, abbassi manualmente la cerniera e prema il pulsante verde sul telecomando di chiamata, il sedile girerà nella posizione corretta ed il montascale scenderà.
- 2/ Per parcheggiare il montascale nel punto di ricarica intermedio in basso, prema il tasto grigio sul telecomando. Il montascale salirà fino al punto di ricarica intermedio e dopo che il montascale si sarà arrestato la guida incernierata potrà essere alzata manualmente.
- 3/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica intermedio abbassi manualmente la cerniera e si assicuri che la cerniera sia bloccata nella posizione corretta. Prema il tasto verde sul telecomando ed il montascale scenderà.

Nota: Il montascale non lascerà il punto di ricarica in alto se la cerniera è aperta.

Funzionamento del sedile motorizzato e del parcheggio intermedio

Se il Suo montascale è dotato di sedile motorizzato e di parcheggio intermedio, operi come segue:

Funzionamento del telecomando

- 1/ Per parcheggiare il montascale nel punto di ricarica prema il tasto grigio sul telecomando. Il montascale salirà fino al punto di ricarica intermedio.
- 2/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica intermedio, prema il tasto verde sul telecomando ed il montascale scenderà.
- 3/ Per girare il sedile, faccia salire il montascale fino al parcheggio in alto e premuto il pulsante verso l'alto, dopo circa 6 bip il sedile girerà.
- 4/ Per chiamare il montascale dal punto di ricarica intermedio prema il tasto verde sul telecomando, il sedile girerà nella posizione corretta e scenderà fino al parcheggio in basso.

Manutenzione

Il Suo montascale dovrebbe essere controllato entro 6 mesi dall'installazione ed in seguito almeno una volta all'anno con ispezioni ogni metà anno.

Inoltre, mantenendo il montascale pulito, il tecnico che effettuerà l'assistenza potrà identificare le parti che necessitano la sostituzione. Ciò contribuirà a prevenire guasti.

La manutenzione quotidiana del vostro montascale consiste semplicemente nel mantenerlo pulito:

- 1/ Passi l'aspirapolvere sulle scale piuttosto che spazzarle
- 2/ Lucidi la guida ogni 2-3 settimane. Quando lucida la guida con prodotto a base di silicone, lo spruzzi sulla superficie superiore della guida e faccia muovere il montascale su e giù almeno una volta. Rimuova il prodotto che resta sulla guida.
- 3/ Pulisca l'imbottitura con un panno umido
- 4/ Rimuova tutto ciò che si trova lungo il tragitto del montascale.

Il cavo del gruppo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo viene in qualche modo danneggiato l'unità del gruppo di alimentazione deve essere cambiata. Chiami in questo caso un tecnico qualificato Liberator per sostituire il gruppo di alimentazione.

Se adattamenti o modifiche sono stati apportati al Suo montascale si assicuri che l'installatore vi abbia dato tutte le informazioni relative a tali operazioni.

IMPORTANTE: Non permetta mai a nessuno di manomettere il Suo montascale.